



VAC-SULES TUBERCULINA PPD BOVINA

Reactivo para
diagnóstico de
tuberculosis



VAC-SULES

TUBERCULINA PPD BOVINA

INDICACIONES:

Reactivo para diagnóstico por inoculación intradérmica de tuberculosis en bovinos y en suinos.

COMPOSICIÓN:

Derivado Proteico purificado de tuberculina (PPD) (3250 UI/0,1 ml).

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:

- Libre de microorganismos contaminantes.
- pH entre 6.5 y 7.5.
- Concentración del conservante:
 - En caso de fenol lo máximo permitido es del 0,5% (p/v)
 - En caso de Glicerol lo máximo permitido es del 10% (v/v)

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía intradérmica, variando las zonas de acuerdo a la especie y al método empleado.

- Bovinos y Suinos: 0,1 mL

En Bovinos:

Prueba anocaudal: La dosis de tuberculina PPD, se inocula en el tercio medio del pliegue anocaudal interno, a unos seis centímetros de la base de la cola y en el centro del pliegue.

Prueba cervical simple: El lugar de inoculación es el tercio medio del cuello, teniendo la precaución de cortar el pelo con tijera o máquina, en el sitio de inyección, en un área de 5 centímetros de diámetro.

Prueba cervical comparativa: El lugar de aplicación es el tercio medio del cuello, inoculando la PPD aviar a unos 10 cm del ligamento nuchal y la PPD bovina a unos 12 cm. debajo de la anterior; teniendo en cuenta en ambos casos el haber cortado el pelo, como fuera indicado en el caso de la prueba cervical simple.

En Suinos:

El lugar de inoculación, es la base de la oreja, teniendo en cuenta que la tuberculina PPD bovina, se inyecta en el lado derecho y la PPD aviar en lado izquierdo.

ESPECIES:

Bovino y Suinos.

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA:

- La Tuberculina debe ser transportada y conservada en frío (2 a 8°C) y protegida de la luz solar directa durante el trabajo a campo.
- Una vez utilizado parte del reactivo, debe descartarse el resto si no va a usarse el mismo día.
- Para someter a los animales a un nuevo examen deben transcurrir 60 días desde la última prueba.
- Se debe tener cuidado de inyectar la tuberculina intradérmicamente sin atravesarla piel con la punta de la aguja.

PRESENTACIONES:

Frascos por 5 ml y 10 ml

PERIODO DE VALIDEZ:

La validez de la tuberculina PPD es de 2 (dos) años, a partir de la aprobación de la serie.